

Linha de Extensão Total Life

Registro/Notificação ANVISA nº: 81231550001

Introdução: Às técnicas médicas e os procedimentos descritos nesta instrução não representam todos os protocolos aceitáveis, nem tem a intenção de substituir a experiência médica no tratamento de um paciente específico. Estes procedimentos são oferecidos somente como um guia aos médicos.

Indicação de Uso: Linha de Extensão Total Life é indicada para procedimentos hemodinâmicos, intervencionistas, terapêuticos e cirúrgicos para conduzir líquidos e fluidos.

Princípio de funcionamento: A Linha de Extensão Total Life são acessórios utilizados em procedimentos hemodinâmicos, intervencionistas, terapêuticos e cirúrgicos para conduzir líquidos e fluidos e conectados a outros acessórios necessários aos procedimentos descritos.

É composto por um tubo extensor em PVC de vários comprimentos e diâmetros e apresentam em suas extremidades distais conectores rotativos Luer Lock macho e não rotativos fêmea.

Modo de Uso do Produto: Leia as instruções de uso do fabricante antes de utilizar o produto. Antes do uso, lubrificar a linha de extensão com solução salina. Repetir o procedimento até que todo o ar que ficou retido no lúmen seja retirado. Conectá-lo ao dispositivo em uso.

Advertências e Precauções:

- O material é de uso único. Não reesterilizar e não reutilizar.
- Não utilizar o produto com prazo de validade vencida, ou se a embalagem estiver danificada.
- O produto não deve ser utilizado para nenhum outro fim, senão aquele que especificamente se destina.

Contraindicações: Não se aplica.

Condições de Armazenamento e transporte: Armazenar e transportar em temperatura 25°C á 40°C e umidade relativa do ar menor que 80%.

Apresentação comercial: A Linha de Extensão Total Life está disponível em embalagem primária de polietileno mais papel grau cirúrgico, contendo uma unidade do produto. Posteriormente é acondicionado em caixa de papelão (celulose).

Método de Esterilização: Óxido de Etileno.

Descarte do produto: A forma de descarte do produto deve seguir o regulamento técnico de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde, conforme descrito na resolução RDC Nº 222, DE 28 DE MARÇO DE 2018

Detentor do registro:

Total Life Comércio de Produtos Médico Hospitalar LTDA
Endereço: Rua Arnaldo Roque Brisque, 80 – Vista Alegre – Vinhedo/SP – CEP:
13.285-423
Resp. Técnica: Juliana Luz Baruta CROSP: 82941.

Fabricado por:

Shanghai INT Medical Instruments Co.,Ltd.
Endereço: Nº 925, Jinyuan Yi Road, Jiading District, 201803 – Shanghai – China.

Shanghai INT Medical Instruments Co.,Ltd.
Endereço: Nº.929, Jinyuan Yi Road, Jiading District, 201803, Shanghai – China.