

Instruções de uso

Torniquete de Compressão Transradial Total Life I

Registro/Notificação ANVISA nº: 81231550076

Introdução: As técnicas médicas e os procedimentos descritos nesta instrução não representam todos os protocolos aceitáveis, nem tem a intenção de substituir a experiência médica no tratamento de um paciente específico. Estes procedimentos são oferecidos somente como um guia aos médicos.

Indicação de Uso: O Torniquete de Compressão transradial Total Life I é usado na hemostasia da opressão da Artéria Radial, após a cirurgia intervencionista de punção da mesma.

Princípio de funcionamento: Atua através da realização da pressão no local da punção para obtenção do bloqueio sanguíneo após a cirurgia intervencionista. Não se destina a ser usado em combinação com qualquer outro dispositivo. Temos os seguintes recursos ou vantagens:

- Transparente fornece fácil monitoramento do local da punção;
- Boa flexibilidade permite que os pacientes se sintam bem confortáveis;
- Conector padrão de trava luer;
- Design de balão duplo.

Modo de Uso do Produto: 1) Não use se a embalagem estiver danificada; 2) Abra a embalagem, retirando o produto; 3) Aplique o torniquete, fixando o centro da cinta de fixação sobre a gaze que recobriu o ponto de punção arteriovenosa, em seguida fixe no braço com dispositivo rotacional de fechamento; 4) Após o uso, trate-o como lixo médico descartável de acordo com os requisitos das leis e regulamentos locais

Advertências e Precauções:

- O material é de uso único. Não reesterilizar e não reutilizar.
- Não utilizar o produto com prazo de validade vencida, ou se a embalagem estiver danificada.

- O produto não deve ser utilizado para nenhum outro fim, senão aquele que especificamente se destina.
- A injeção de ar recomendada não é superior a 40ml. A injeção de ar excessiva pode resultar em vazamento ou ruptura

Contraindicações: Não se aplica.

Condições de Armazenamento e transporte: Armazenar em local seco, bem ventilado e limpo. Umidade relativa do ar abaixo de 80% e temperatura entre 0-40°C. Durante o transporte o produto deve ser mantido longe da umidade, sol, chuva, altas temperaturas e impacto.

Apresentação comercial: O Torniquete de Compressão Transradial está disponível em embalagem primária de policloreto de vinila mais papel grau cirúrgico, contendo uma unidade do produto. Posteriormente é acondicionado em caixa de papelão (celulose).

Método de Esterilização: Óxido de Etileno.

Descarte do produto: A forma de descarte do produto deve seguir o regulamento técnico de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde, conforme descrito na resolução RDC Nº 222, DE 28 DE MARÇO DE 2018

Detentor do registro:

Total Life Comércio de Produtos Médico Hospitalar LTDA
Endereço: Rua Arnaldo Roque Brisque, 80 – Vista Alegre – Vinhedo/SP – CEP: 13.285-423
Resp. Técnica: Juliana Luz Baruta CROSP: 82941.

Fabricado por:

Shanghai INT Medical Instruments Co.,Ltd.
Endereço: Nº 925, Jinyuan Yi Road, Jiading District, 201803 – Shanghai – China.

Shanghai INT Medical Instruments Co.,Ltd.
Endereço: Nº.929, Jinyuan Yi Road, Jiading District, 201803, Shanghai – China.